


Інструкції з використання

munchkin | 59S™



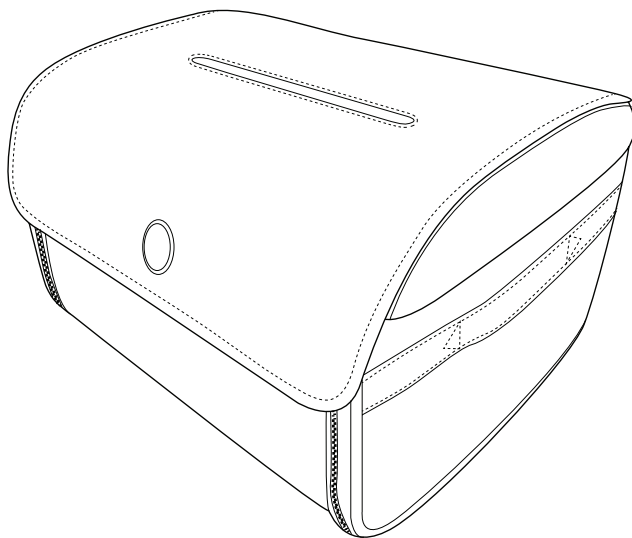

УФ-стерилізатор



ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАТИ НА ВИПАДОК НЕОБХІДНОСТІ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед початком користування цим виробом

Зміст

 ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ	3
Вступ.....	6
 КОМПЛЕКТАЦІЯ	7
Безпека.....	8
Використання УФ-лакмусового паперу.....	8
Використання USB акумулятора.....	8
 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ	10
Таблиця сигналів світлового індикатора.....	10
Догляд та очищення.....	13
Інструкція по догляду за чохлам	13
Інструкція з усунення несправностей.....	13
Гарантія.....	13
 СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ	14
Контактна інформація.....	14

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ

Під час використання електричних приладів, особливо коли в цей час поруч присутні діти, завжди слід дотримуватись запобіжних заходів з безпеки, включаючи наступні:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ УФ-СТЕРИЛІЗАТОРА

НЕБЕЗПЕКА: Для зниження ризику ураження електрострумом:

- Завжди вимикайте цей виріб з розетки одразу ж після використання.
- Не використовуйте під час купання в ванній.
- Не кладіть та не зберігайте виріб в місцях, де він може впасти або де його можна випадково стягнути у ванну або раковину.
- Не кладіть та не кидайте у воду або іншу рідину.
- Не витягуйте виріб одразу, якщо він впав у воду. Негайно вимкніть його з розетки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зниження ризику отримання опіку, ураження струмом, виникнення пожежі або травмування людей:

- Пряме споглядання світла, що випромінює лампа цього апарату, може спричинити пошкодження очей. Завжди вимикайте світлодіоди перед тим, як відкрити захисну кришку.
- Радіація від УФ світлодіодів може спричинити серйозний опік шкіри та травмування очей.
- Тривале УФ опромінювання може пошкодити пластик, тканину та резину.
- Цей прилад містить УФ випромінювач. Не дивіться на джерело світла.
- Ніколи не використовуйте цей прилад для їжі та домашніх тварин.
- Для запобігання опромінення ультрафіолетом не намагайтеся відкрити кришку, коли вона заблокована.
- УФ-стерилізатор ні в якому разі не можна залишати без нагляду, коли він увімкнений в розетку.
- Вимагається пильний нагляд, коли цей виріб використовується поруч з дітьми або людьми з інвалідністю.
- Використовуйте УФ-стерилізатор лише за його призначенням так, як описано в цій інструкції. Не використовуйте додаткове обладнання, яке не рекомендоване компанією Munchkin.
- Ні в якому разі не використовуйте цей виріб, якщо в ньому пошкоджено USB шнур або гніздо, якщо він не працює належним чином, якщо він впав та пошкодився або впав у воду. Поверніть виріб до сервісного центру для проведення огляду та ремонту.
- Тримайте шнур живлення подалі від нагрітих поверхонь.
- Ніколи не закривайте вентиляційні отвори виробу та не кладіть його на м'яку поверхню, як ліжко або диван, де вентиляційні отвори можуть бути закритими. Не допускайте потрапляння у вентиляційні отвори ворсинок, волосся та ін.
- Не використовуйте на вулиці та не користуйтеся у приміщеннях, де застосовувались аерозолі та ін.
- Ніколи не кидайте та не вставляйте будь-який предмет в отвори УФ-стерилізатора. Ніколи не використовуйте виріб, коли ви спите або збираєтесь засинати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зниження ризику виникнення пожежі, отримання електрошоку або травми:

- Не залишайте прилад ввімкненим в розетку. Відключайте його від джерела живлення, коли він не використовується та перед обслуговуванням приладу.
- Не дозволяйте використання приладу в якості іграшки. Вимагається пильний нагляд, коли цей виріб використовується дітьми або біля дітей.
- Використовуйте його лише так, як зазначено в цій інструкції. Використовуйте тільки рекомендоване компанією Munchkin додаткове обладнання.
- Не використовуйте з пошкодженим шнуром або розеткою. Якщо прилад не працює належним чином, впав з висоти, пошкоджений, був залишений на вулиці або впав у воду, поверніть його до сервісного центру.
- Не тягніть та не використовуйте шнур у якості ручки, не закривайте за допомогою шнура двері та не обмотуйте шнур навколо гострих кутів. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Не вимикайте прилад, тягнучи за шнур. Для вимкнення тримайтеся за вилку, а не за шнур.
- Не беріть вилку або прилад мокрими руками.
- Вимкніть всі функції перед вимкненням з розетки.
- Проводьте обслуговування приладу лише за допомогою кваліфікованого спеціаліста з ремонту з використанням оригінальних запасних частин. Це запорука безпечності вибору і після обслуговування.
- Цей прилад може використовуватись дітьми віком від 8 років та більше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями або особами, які не мають достатньо досвіду та знань, у тих випадках, коли над ними здійснюється нагляд або вони були проінструктовані щодо використання приладу в безпечний спосіб і вони розуміють всю можливу небезпеку. Дітям не дозволяється грати з приладом. Чистка та звичайне обслуговування приладу, яке не потребує кваліфікованого спеціаліста, не може здійснюватися дітьми без нагляду.
- Прилад може використовуватись тільки з USB-кабелем, який додається в комплекті до приладу.
- Необхідно використовувати струм з екстранизькою напругою відповідно до маркування на приладі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад містить УФ випромінювач. Не дивіться на джерело світла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не відключайте систему блокування «інтерлок» на корпусі приладу. Вона призначена для зменшення ризику надмірного випромінювання ультрафіолету. Обережно, цей виріб випромінює ультрафіолет.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.



Цей символ означає, що цей виріб не слід викидати разом з іншим сміттям. Для запобігання можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованої утилізації відходів, утилізуйте його з належною відповідальністю для забезпечення екологічно безпечної переробки та повторного використання матеріальних ресурсів. Для повернення вживаного приладу, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або зверніться до продавця, у якого був придбаний цей виріб. Вони зможуть прийняти цей виріб для безпечної для довкілля його переробки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БАТАРЕЇ

У виключних випадках батарейки можуть виділяти рідину, яка може спричинити хімічний опік або пошкоджувати виріб. Для уникнення протікання батарейки дотримуйтесь наступних інструкцій:

- Вставте акумулятор із дотриманням правильної полярності.
- Не допускайте короткого замикання клем акумулятора.
- Витягніть акумулятор на час тривалого періоду, коли прилад не використовується.
- Не утилізуйте цей виріб за допомогою вогню. Акумулятор, який знаходиться всередині, може вибухнути або протекти.
- Не встромлюйте пальці або руку в середину акумулятора.
- Не допускайте потрапляння акумулятора під дощ чи сніг.
- Не занурюйте акумулятор у води або іншу рідину.
- Використання блоку живлення або зарядного пристрою, які не рекомендовані або не продаються виробником акумулятора, може призвести до виникнення ризику травмування людей.
- Дозволяється використовувати лише акумулятори однакового або еквівалентного типу згідно рекомендацій виробника.
- Не використовуйте акумулятор із перевищенням його вихідної потужності. Перенавантаження вихідної потужності понад максимальний ліміт може спричинити пожежу або травмування людей.
- Не використовуйте акумулятор, який пошкоджений або конструкція якого змінена. Пошкоджений або перероблений акумулятор може непередбачувано функціонувати, що може спричинити пожежу, вибух або травмування.
- Не розбирайте акумулятор.
- Віднесіть його до кваліфікованого спеціаліста у випадку, коли йому необхідний ремонт або обслуговування.
- Неправильне складання акумулятора може спричинити пожежу або травмування людей.
- Не допускайте впливу на акумулятор вогню та надмірної температури. Вплив вогню або температури, вищої за 100 °C, може спричинити вибух.
- Акумулятор, який вичерпав свій ресурс служби, слід вийняти з приладу та утилізувати з дотриманням належних заходів безпеки.


ВСТУП

УФ-стерилізатор дозволяє дезінфікувати іграшки та інші дрібні речі вашої дитини швидко та легко. Він зручний, живиться від USB-портативного акумулятора (входить до комплекту), щоб ви змогли захистити здоров'я вашої дитини як вдома, так і під час подорожі.


Стерилізація займає 5 хвилин (300 секунд), вбиває шкідливі бактерії та зменшує неприємні запахи.

В обох режимах прилад використовує науково схвалену технологію ультрафіолету (УФ), яка вбиває 99,99 % шкідливих бактерій та вірусів. УФС успішно використовувалось в індустрії охорони здоров'я для дезінфекції повітря та поверхонь. Воно не містить озону та не залишає небезпечних залишків або шкідливих хімікатів.


Також УФ-стерилізатор є безпечним в користуванні. Якщо його кришка буде відкрита під час використання, то вмонтований перемикач системи захисту вимкне УФ світло автоматично.

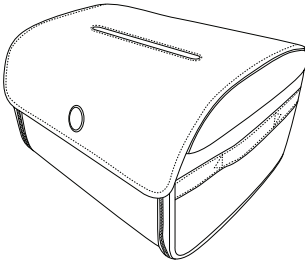


УФ-стерилізатор

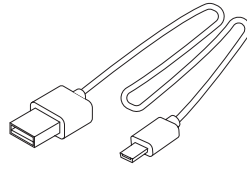


Кабель USB
(USB-A до мікро-USB)

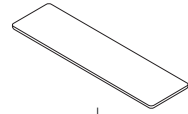


УФ-лакмусовий
папір

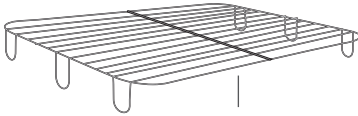

Підставка для речей

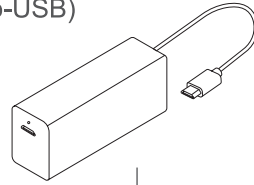


PB2000 (портативний
акумулятор з можливістю
перезарядки)

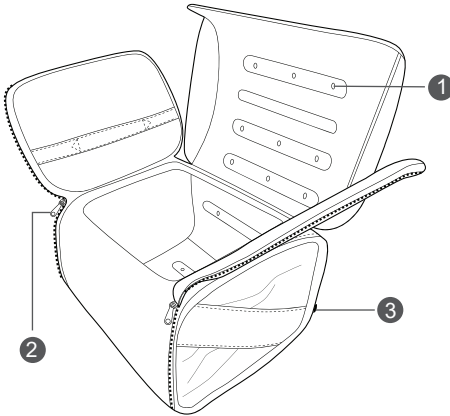

1 УФ світлодіоди

2 Застібка-блискавка

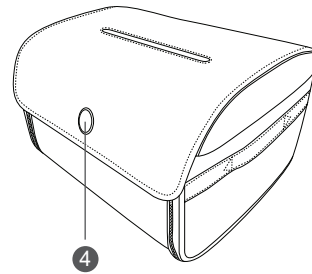

3 Мікро-USB порт

4 Світловий індикатор /
кнопка живлення

БЕЗПЕКА

Якщо кришка буде відкрита під час використання, УФ світло буде автоматично вимкнене для того, щоб захистити шкіру та очі від УФ випромінювання.

ВИКОРИСТАННЯ УФ ЛАКМУСОВОГО ПАПЕРУ


Для того, щоб впевнитись, що пристрій працює правильно, просто покладіть УФ-лакмусовий папір в стерилізатор написом «Munchkin / 59S» догори. Згодом натисніть світловий індикатор «Munchkin / 59S», щоб почати цикл стерилізації.

Якщо УФ працює, напис на лакмусовому папері стане знебарвленим. Колір повернеться до нормального за одну хвилину.

Викиньте, будь ласка, УФ-лакмусовий папір після тестування.

ВИКОРИСТАННЯ USB АКУМУЛЯТОРА

ПРИМІТКА: Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням.

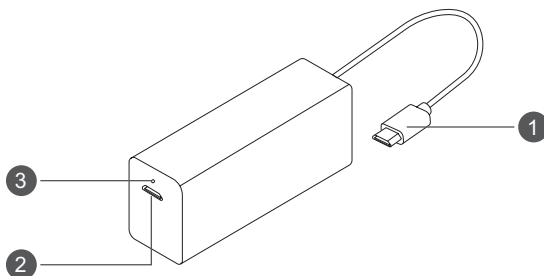

- 1 Кабель з вихідним мікро-USB роз'ємом (для подачі живлення до стерилізатора)
- 2 Вхідний мікро-USB порт (для зарядки акумулятора)
- 3 Світловий індикатор, що відображає стан акумулятора


ЯК ЗАРЯДЖАТИ АКУМУЛЯТОР

Вставте мікро-USB роз'єм кабелю у вхідний мікро-USB порт акумулятора. Після цього, вставте USB роз'єм кабелю в USB порт, з якого подається живлення, або в електро-розетку, використовуючи USB адаптер (не входить до комплекту).

Світловий індикатор акумулятора миготітиме червоним світлом під час зарядки. Коли акумулятор повністю зарядиться, світловий індикатор горітиме постійним білим світлом.

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ СТЕРИЛІЗАТОР ДО ЖИВЛЕННЯ

Вставте вихідний мікро-USB роз'єм акумулятора в мікро-USB порт стерилізатора. Світловий індикатор акумулятора горітиме постійним білим світлом, відображаючи, що акумулятор увімкнений. Якщо світловий індикатор горить червоним, це означає, що акумулятор слід зарядити.

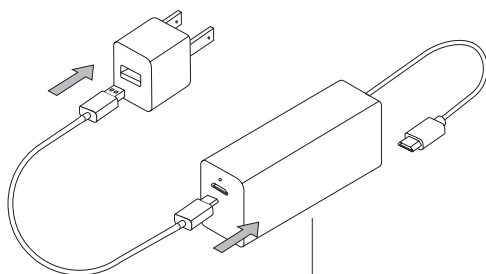

Номінальна вхідна потужність:
5VDC 1A (максимум)



ТАБЛИЦЯ СИГНАЛІВ СВІТЛОВОГО ІНДИКАТОРА

СИГНАЛ СВІТЛОВОГО ІНДИКАТОРА	РЕЖИМ
Миготить	Процес дезінфекції
Не горить	Вимкнений

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

1. Відкрийте кришку та покладіть підставку для речей на дно пристрою

2. Покладіть речі на підставку для речей.
Не кладіть речі одна на одну.

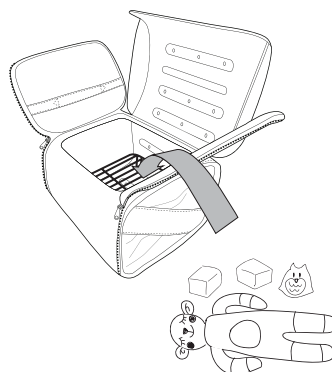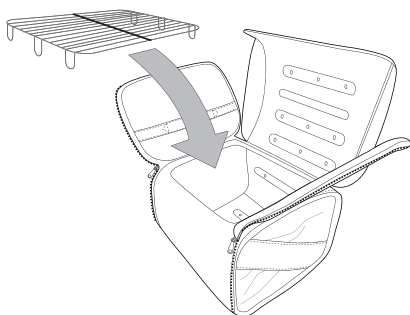


ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РЕЧЕЙ:

ПРИМІТКА: Цей прилад дезінфікує поверхні, на які потрапляє УФ світло. Пустушка повинна бути відкрита для потрапляння на неї УФ світла.


ПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ:

Покладіть речі окремо одна від одної для того, щоб світло максимально потрапляло на поверхні.

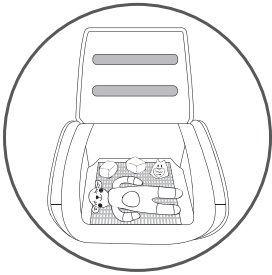


НЕПРАВИЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РЕЧЕЙ:


Розміщення великої кількості речей, які перекриватимуть одна одну, зменшить ефективність дезінфекції.

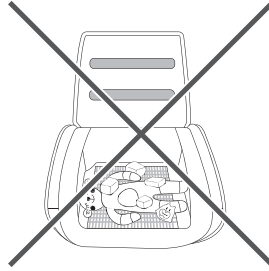

3. Закрийте кришку

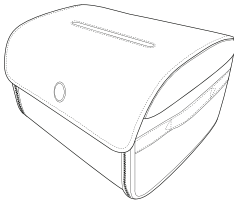


4. Вставте вихідний мікро-USB роз'єм акумулятора в мікро-USB порт стерилізатора. Впевніться в тому, що акумулятор повністю заряджений, перевіривши чи світловий індикатор акумулятора горить постійним білим світлом. Якщо горить червоним, то акумулятор слід зарядити.

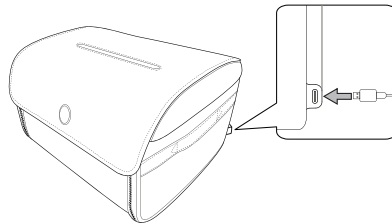

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

5. Натисніть «Світловий індикатор / кнопку живлення» для запуску 5 хвилинного циклу.

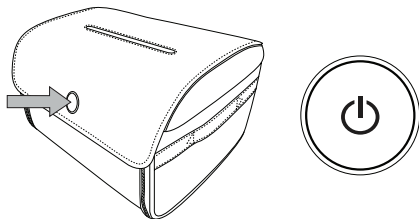

6. По завершенню дезінфекції світловий індикатор автоматично вимкнеться. Відкрийте кришку для того, щоб вийняти речі.



ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Цей пристрій не є водонепроникним. Не занурюйте його у воду.

Для очистки протріть поверхню пристрою рушником. Витріть всі краплі для запобігання пошкодження електронних схем пристрою вологою.

В проміжках часу між користуванням або під час перенесення в подорожі, покладіть, будь ласка, цей виріб у сумку для зберігання, щоб запобігти потраплянню пилу та для захисту поверхні від подряпин.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЧОХЛОМ З ТЕКСТИЛЮ

Поверхню мити чистою вологою тканиною. Сушити на повітрі. Не занурюйте у воду та іншу рідину. Будь-яке інше обслуговування повинно проводитись авторизованим представником з обслуговування.

ІНСТРУКЦІЯ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Якщо кнопка живлення не реагує або пристрій не вмикається:

(А) Перевірте чи USB акумулятор повністю заряджений.

(Б) Перевірте чи USB кабель правильно підключений до джерела живлення. Витягніть кабель та знову щільно вставте його в гніздо.

(В) У випадку пошкодження електричного обладнання, потрібно звернутися в авторизований сервісний центр для гарантійного чи післягарантійного обслуговування.

2. Якщо стерилізатор не виконує 300 секундний цикл:

(А) Перевірте чи USB акумулятор повністю заряджений. Зарядіть акумулятор, якщо його світловий індикатор горить червоним.

ГАРАНТІЯ

На УФ-стерилізатор Munchkin розповсюджується 1-річна гарантія від дефектів від дати продажу. У випадку неналежного функціонування або виникнення дефектів протягом гарантійного періоду, компанія Munchkin, Inc., на свій розсуд замінить або відремонтує виріб по гарантії. Після отримання виробу та доведення покупки зазначенням дати покупки, дефектна деталь буде негайно відремонтована або замінена та повернута вам.

ПРИМІТКА: Ця гарантія не поширюється на випадки використання не за призначенням, порушення правил експлуатації, надмірного зношення, недбалості, впливу оточуючого середовища, внесення змін в конструкцію виробу або при випадковому пошкодженні. Будь-яке внесення змін в конструкцію виробу або видалення з виробу інформації про дату його виробництва робить всі претензії до виробника недійсними.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Назва виробу: дитячий стерилізатор Munchkin 59SUVLED
- Модель: МКСL0732REV1
- Вхідний роз'єм: Мікро-USB
- Номінальна вхідна потужність: 3-5DVC, 10W. Використовувати лише з акумулятором (PB2000), який додається до комплекту
- Габаритні розміри: 280 мм x 350 мм x 203 мм
- Вага нетто: 1 кг
- Термін служби УФ світлодіоду: 3000 годин
- Робоча температура: 0-40°C
- Температура зберігання: -20-55°C



- Модель акумулятора: PB2000
- Тип акумулятора: літій-іонна батарея
- Потужність акумулятора: 2000mAh3.7V/7.4Wh
- Вхідний інтерфейс: мікро-USB (вхідний порт)
- Вихідний інтерфейс: мікро-USB (вихідний роз'єм)
- Номінальна вхідна потужність: 5VDC, 1A(Max)
- Номінальна вихідна потужність: 3 – 4.2 VDC, 3.5A
- Час роботи акумулятора: 2000mAh акумулятор забезпечує приблизно 45 хвилин роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

У випадку виникнення будь-яких питань або бажання надати коментарі стосовно цього продукту, будь ласка, відвідайте веб-сайт www.munchkin.com

MUNCHKIN@I 59STM I MUNCHKIN.COM

АРТИКУЛ: 051851. НОМЕР МОДЕЛІ: МКСL0732 REV1. © 2019 MUNCHKIN, INC. ІМПОРТОВАНО КОМПАНІЄЮ LINDAM LTD (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ КОМПАНІЇ MUNCHKIN, INC.), SUITE 1A1, CENTRALHOUSE, OTLEYROAD, HARROGATE, NORTHYORKSHIRE, HG3 1UF, АНГЛІЯ. ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ. 051851-ІМ01-2(A) ВСІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ, УПАКОВКУ ТА НАДРУКОВАНУ АБО ЕЛЕКТРОННУ ІНФОРМАЦІЮ ЗАРЕЗЕРВОВАНО КОМПАНІЄЮ SHENZHENUVLEDOPTICALTECHNOLOGYCO., LTD. ТОРГОВІ МАРКИ 59S ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ КОМПАНІЇ SHENZHENUVLEDOPTICALTECHNOLOGYCO., LTD. ВИРОБНИК: SHENZHEN UVLED OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD. АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА: 2-4/F, BUILDING 2A, NO.9, BANGKAI ROAD, HIGH-TECH INDUSTRIAL PARK, GUANGMING DISTRICT, SHENZHEN, КИТАЙ
ПІДСІЧНА ЛІЦЕНЗІЯ: YWXZZ(2018)-02 № 9142
ПОШТОВИЙ ІНДЕКС: 518132
[HTTP://WWW.59S.COM](http://WWW.59S.COM)



